

Analysenliste

Diese Liste wird kontinuierlich mit weiteren Analysen ergänzt.
Bei Rückfragen oder Wünsche kontaktieren Sie uns gerne: info@laborsviz.ch

Analysenname	BAG Abrechnungs- Position	Tax- Punkte	Primär- Röhrchen	Probe	Stabilität Raum- Temperatur	Stabilität 4°C	Stabilität 20°C	Zusätzliche präanalytische Information	Methode	Gerät	Einheit
ACTH	1239.00	61.2	EDTA-Röhrchen	EDTA Plasma	1 Stunde	6 Stunden	1 Monat	Sofort nach der Blutentnahme zentrifugieren und EDTA-Plasma abpipettieren und einfrieren.	Chemilumineszenz- Immunoassay	Liaison XL	ng/l
AFP (Abbott)	1034.00	17.4	Trenngel Serum	Serum	3 Tage	7 Tage	1 Jahr		Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I	U/ml
Albumin	1021.00	2.3	Trenngel Serum	Serum	7 Tage	7 Tage	3 Monate		Kolorimetrische Methode (Bromkresolgrün)	Alinity C	g/l
Albumin im Sammelurin	1022.00	10.1	Urin 24hSammel nativ	Urin						Alinity C	
Albumin im Spontanurin	1022.00	10.1	Urin Spontan nativ	Urin	7 Tage	1 Monat	6 Monate	Zusätzlich wird Kreatinin im Urin gemessen und	Immunturbidimetrie	Alinity C	mg/l
Aldosteron	1026.00	27	EDTA-Röhrchen	EDTA Plasma	3 Tage	3 Tage	1 Jahr	Blutentnahme nach 30 Min. ruhen	Chemilumineszenz- Immunoassay	Liaison XL	pmo/l
Alpha-1 Antitrypsin	1032.00	20.7	Trenngel Serum	Serum	4 Stunden	7 Tage	3 Monate	Zusätzlich wird CRP gemessen um eine Akute-	Immunturbidimetrie	Alinity C	g/l
Amikacin	1062.00	29.7	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	8 Stunden	2 Tage	3 Monate	Blutentnahme im steady state vor der nächsten	Immunturbidimetrie	Alinity C	mg/l
Ammoniak	1045.00	37.8	EDTA-Röhrchen	EDTA Plasma	N/A	2 Stunden	21 Tage	Sofort nach der Blutentnahme zentrifugieren und EDTA-Plasma abpipettieren und einfrieren.	Kolorimetrische Methode	Alinity C	µmo/l
Amphetamine Screen	1686.00	17.5	Urin-Röhrchen	Urin	2 Tage	5 Tage	6 Monate		Enzym-Immunoassay	Alinity C	keine (neg/pos)
Androstendion	1055.00	27	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	14 Tage	1 Jahr		Chemilumineszenz-	Liaison XL	nmo/l
Apolipoprotein A1	1087.00	17.9	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	2 Tage	2 Monate		Immunturbidimetrie	Alinity C	g/l
Apolipoprotein B	1089.00	17.9	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	2 Tage	2 Monate		Immunturbidimetrie	Alinity C	g/l
Barbiturate Screen	1686.00	17.5	Urin-Röhrchen	Urin	2 Tage	5 Tage	3 Monate		Enzym-Immunoassay	Alinity C	keine (neg/pos)
Benzydiazepine Screen	1686.00	17.5	Urin-Röhrchen	Urin	2 Tage	7 Tage	3 Monate		Enzym-Immunoassay	Alinity C	keine (neg/pos)
Beta-2-Mikroglobulin (Abbott)	1201.00	13.3	Trenngel Serum	Serum	N/A	7 Tage	1 Jahr		Immunturbidimetrie	Alinity C	mg/l
Bicarbonat	1205.007	7.8	Trenngel Serum	Serum					Kolorimetrische Methode	Alinity C	nmo/l
C-Peptid	1244.00	33.3	Trenngel Serum	Serum	N/A	1 Tag	3 Monate	Blutentnahme nüchtern.	Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I	pmo/l
CA 125 (Abbott)	1216.00	21.6	Trenngel Serum	Serum	3 Tage	5 Tage	3 Monate		Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I	ku/l
CA 15-3 (Abbott)	1217.00	18	Trenngel Serum	Serum	3 Tage	5 Tage	3 Monate		Chemilumineszenz-	Alinity I	ku/l
CA 19-9 (Abbott)	1218.00	21.6	Trenngel Serum	Serum	7 Tage	1 Monate	3 Monate		Chemilumineszenz-	Alinity I	ku/l
Calcitonin	1221.00	54	Trenngel Serum	Serum	2 Stunden	10 Stunden	15 Tage	Sofort nach der Blutentnahme zentrifugieren und	Chemilumineszenz-	Liaison XL	ng/l
Calcium	1223.00	2.5	Trenngel Serum	Serum	2 Monate	5 Monate	6 Monate	Zusätzlich wird Albumin gemessen und	Kolorimetrische Methode	Alinity C	mmo/l
Calcium im Sammelurin	1223.00	2.5	Urin 24hSammel HCl	Urin-HCl						Alinity C	
Calcium im Spontanurin	1223.00	2.5	Urin Spontan nativ	Urin	2 Tage	6 Tage	6 Monate		Kolorimetrische Methode (Arsenazo)	Alinity C	mmo/l
Calprotectin im Stuhl	1224.10	54.9	Stuhl-Röhrchen	Stuhl	8 Stunden	3 Tage	3 Monate		Chemilumineszenz-	Liaison XL-Stuhl	µg/g
Cannabis/THC Screen	1686.00	17.5	Urin-Röhrchen	Urin	2 Tage	7 Tage	3 Monate		Enzym-Immunoassay	Alinity C	keine (neg/pos)
Carbamazepin	1070.00	14.3	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	2 Tage	7 Tage	3 Monate	Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Tatspiegel)	Immunturbidimetrie	Alinity C	µmo/l
CEA (Abbott)	1227.00	18	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	7 Tage	6 Monate		Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I	µg/l
Chlorid	1229.00	2.9	Trenngel Serum	Serum	7 Tage	7 Tage	1 Jahr		Ionenselektive Elektrode	Alinity C	mmo/l
Chlorid im Sammelurin	1229.00	2.9	Urin 24hSammel nativ	Urin						Alinity C	
Chlorid im Spontanurin	1229.00	2.9	Urin Spontan nativ	Urin	2 Tage	7 Tage	7 Tage		Ionenselektive Elektrode	Alinity C	mmo/l
Cocain Screen	1686.00	17.5	Urin-Röhrchen	Urin	2 Tage	7 Tage	3 Monate		Enzym-Immunoassay	Alinity C	keine (neg/pos)
Coenuloplasmin	1220.00	17.9	Trenngel Serum	Serum	8 Tage	14 Tage	1 Jahr		Immunturbidimetrie	Alinity C	g/l
Cortisol (11-13 Uhr)	1240.10	17.4	Trenngel Serum	Serum						Alinity I	
Cortisol (15-17 Uhr)	1240.10	17.4	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	3 Tage	1 Jahr		Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I	
Cortisol (7-9 Uhr)	1240.10	17.4	Trenngel Serum	Serum						Alinity I	nmo/l
CRP	1245.00	9	Trenngel Serum	Serum					Immunturbidimetrie	Alinity C	mg/l
CYFRA 21-1 (Abbott)	1255.00	39.6	Trenngel Serum	Serum	7 Tage	1 Monat	1 Jahr		Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I	µg/l
Cystatin C	1257.00	18.9	Trenngel Serum	Serum	14 Tage	21 Tage	6 Monate	Zusätzlich wird die eGFR berechnet.	Immunturbidimetrie	Alinity C	mg/l
DHEAS	1262.00	21.6	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	8 Tage	2 Monate		Chemilumineszenz-	Alinity I	µmo/l
Digoxin	1267.00	9.9	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	N/A	2 Tage	7 Tage	Blutentnahme 6-8 Stunden nach der letzten	Immunturbidimetrie	Alinity C	nmo/l
EDDP (Metadon-Metabolit) Screen	1686.00	17.5	Urin-Röhrchen	Urin	2 Tage	7 Tage	3 Monate		Enzym-Immunoassay	Alinity C	keine (neg/pos)
Estradiol (DiaSorin)	1307.00	17.4	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	5 Tage	1 Jahr	Das Medikament Fulvestrant (Faslodex *) kann	Chemilumineszenz-	Liaison XL	pmo/l
Feritin (Abbott)	1314.00	7.1	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	7 Tage	1 Jahr		Chemilumineszenz-	Alinity I	µg/l
Folsäure	1329.00	11.8	Trenngel Serum	Serum	8 Stunden	2 Tage	1 Monat	Blutentnahme nüchtern. Bereits leichte	Chemilumineszenz-	Alinity I	nmo/l
Freie kappa-Leichtketten	1459.00	33.3	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	21 Tage	6 Monate		Immunturbidimetrie	Alinity C	mg/l
Freie lambda-Leichtketten	1460.00	33.3	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	21 Tage	6 Monate		Immunturbidimetrie	Alinity C	mg/l
Fruktosamin	1333.00	14.3	Trenngel Serum	Serum	3 Tage	14 Tage	2 Monate		Kolorimetrische Methode	Alinity C	µmo/l
FT3	1732.00	9.4	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	7 Tage	1 Jahr		Chemilumineszenz-	Alinity I	pmo/l
FT4	1729.00	8.1	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	6 Tage	1 Jahr		Chemilumineszenz-	Alinity I	pmo/l
Gallensäuren total	1340.00	54	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	7 Tage	1 Jahr		Kolorimetrische Methode	Alinity C	µmo/l
Genitamin	1062.00	29.7	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	N/A	7 Tage	30 Tage	Blutentnahme im steady state vor der nächsten	Immunturbidimetrie	Alinity C	ku/l
HCG Tumormarker (DiaSorin)	1425.00	15.8	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	7 Tage	1 Jahr		Chemilumineszenz-	Liaison XL	ku/l
HGH (Wachstumshormon)	1761.00	61.2	Trenngel Serum	Serum	N/A	1 Tag	3 Monate		Chemilumineszenz-	Liaison XL	µg/l
Holotranscobalamin	1727.10	54.9	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	3 Tage	3 Monate		Chemilumineszenz-	Alinity I	pmo/l
Homocystein	1422.00	27	Fluorid Röhrchen	Fluorid Plasma	N/A	14 Tage	1 Jahr	Blutentnahme nüchtern. Bevorzugtes Material	Chemilumineszenz-	Alinity I	µmo/l
IGF-1	1671.00	47.7	Trenngel Serum	Serum	4 Tage	7 Tage	1 Jahr		Chemilumineszenz-	Liaison XL	ng/ml
Insulin	1471.00	18.9	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	5 Tage	3 Monate	Blutentnahme nüchtern.	Chemilumineszenz-	Alinity I	pmo/l
Kalium	1479.00	2.5	Trenngel Serum	Serum	42 Tage	42 Tage	1 Jahr	Kalium steigt in nicht-zentrifugiertem Vollblut an. Bereits leichte Hämolyse führt zu falsch-hohe	Ionenselektive Elektrode	Alinity C	mmo/l
Kalium im Sammelurin	1479.00	2.5	Urin 24hSammel nativ	Urin						Alinity C	
Kalium im Spontanurin	1479.00	2.5	Urin Spontan nativ	Urin	45 Tage	2 Monate	1 Jahr		Ionenselektive Elektrode	Alinity C	mmo/l
Komplement C3	1501.10	20.7	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	3 Tage	1 Jahr		Immunturbidimetrie	Alinity C	g/l
Komplement C4	1503.00	20.7	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	2 Tage	3 Monate		Immunturbidimetrie	Alinity C	g/l
Kreatinin	1509.00	2.3	Trenngel Serum	Serum	7 Tage	7 Tage	3 Monate	Zusätzlich wird die eGFR berechnet.	Enzymatische Methode	Alinity C	µmo/l
Kreatinin im Sammelurin	1509.00	2.3	Urin Spontan nativ	Urin						Alinity C	
Kreatinin im Spontanurin	1509.00	2.3	Urin Spontan nativ	Urin	2 Tage	6 Tage	6 Monate		Enzymatische Methode	Alinity C	mmo/l
Lithium	1541.00	11.2	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	1 Tag	7 Tage	6 Monate	Blutentnahme im steady state vor der nächsten	Kolorimetrische Methode	Alinity C	mmol/l
Lp(a)	1539.00	17.9	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	8 Tage	1 Jahr		Immunturbidimetrie	Alinity C	mg/l
Methotrexat	1567.00	75.6	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	2 Tage	1 Jahr		Enzym-Immunoassay	Alinity I	µmo/l
Natrium	1574.00	2.3	Trenngel Serum	Serum	14 Tage	14 Tage	1 Jahr		Ionenselektive Elektrode	Alinity C	mmo/l
Natrium im Sammelurin	1574.00	2.3	Urin 24hSammel nativ	Urin						Alinity C	
Natrium im Spontanurin	1574.00	2.3	Urin Spontan nativ	Urin					Ionenselektive Elektrode	Alinity C	mmo/l
NSE (Abbott)	1581.00	33.3	Trenngel Serum	Serum	N/A	1 Tag	1 Monat	Bereits leichte Hämolyse führt zu falsch-hohe Resultate.	Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I	µg/l
NT-proBNP	1576.00	63	Trenngel Serum	Serum	3 Tage	6 Tage	1 Jahr		Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I	pg/ml
Opiate Screen	1686.00	17.5	Urin-Röhrchen	Urin	2 Tage	7 Tage	3 Monate		Enzym-Immunoassay	Alinity C	keine (neg/pos)

Ostase (knochenspezifische AP)	1029.00	27	Trenngel Serum	Serum						Chemilumineszenz-Immunoassay	Liaison XL	µg/l
Osteocalcin	1589.00	46.8	Trenngel Serum	Serum	N/A	N/A	6 Monate	Sofort nach der Blutentnahme zentrifugieren und Serum abpipettieren und einfrieren.		Chemilumineszenz-Immunoassay	Liaison XL	µg/l
Pankreas-Elastase im Stuhl	1273.00	47.7	Stuhlröhrchen	Stuhl	8 Stunden	7 Tage	3 Monate			Chemilumineszenz-Immunoassay	Liaison XL-Stuhl	µg/g
Phenobarbital	1070.00	14.3	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	3 Tage	7 Tage	3 Monate	Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Tatspiegel)		Chemilumineszenz-Immunturbidimetrie	Alinity C	µmol/l
Phenyton	1070.00	14.3	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	3 Tage	7 Tage	3 Monate	Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Tatspiegel)		Enzym-Immunoassay	Alinity C	µmol/l
Phosphat	1601.00	2.9	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	4 Tage	1 Jahr	Phosphat steigt in nicht-zentrifugiertem Vollblut an.		Kolorimetrische Methode	Alinity C	mmol/l
Phosphat im Sammelurin	1601.00	2.9	Urin 24hSammel HCl	Urin-HCl							Alinity C	
Phosphat im Spontanurin	1601.00	2.9	Urin Spontan HCl	Urin-HCl	2 Tage	6 Monate				Kolorimetrische Methode	Alinity C	mmol/l
Präalbumin	1615.00	17.9	Trenngel Serum	Serum	3 Tage	7 Tage	1 Jahr			Immunturbidimetrie	Alinity C	g/l
Progesteron	1620.00	17.4	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	10 Tage	6 Monat			Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I	nmol/l
Prolaktin	1623.00	13.3	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	7 Tage	1 Jahr	Blutentnahme zwischen 8 und 10 Uhr. Eine körperliche Untersuchung erst nach der		Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I	µg/l
Protein im Sammelurin	1635.00	7.8	Urin 24hSammel nativ	Urin							Alinity C	
Protein im Spontanurin	1635.00	7.8	Urin Spontan nativ	Urin	1 Tag	7 Tage	1 Monat			Turbidimetrie	Alinity C	mg/l
Protein S-100 (DiaSorin)	-	37	Trenngel Serum	Serum	8 Stunden	2 Tage	3 Monate			Chemilumineszenz-Immunoassay	Liaison XL	µg/l
Protein total	1634.00	2.3	Trenngel Serum	Serum	6 Tage	30 Tage	1 Jahr			Kolorimetrische Methode (Biuret)	Alinity C	g/l
PSA frei (Abbott)	1627.00	10.6	Trenngel Serum	Serum	7 Tage	14 Tage	1 Jahr	PSA total mit automatischer Stufendiagnostik, wobei PSA frei nur bestimmt wird, wenn PSA total		Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I	µg/l
PSA total (Abbott)	1626.00	10.6	Trenngel Serum	Serum	7 Tage	14 Tage	1 Jahr	Eine körperliche/urologische Untersuchung erst nach der Blutentnahme durchführen. Dreitägige		Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I	µg/l
PTH intakt (Abbott)	1595.00	33.3	EDTA-Röhrchen	EDTA Plasma	1 Tag	3 Tage	6 Monat	Bevorzugtes Material EDTA-Röhrchen, da PTH in Serum rasch abgebaut wird.		Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I	pmol/l
Renin	1646.00	61.2	EDTA-Röhrchen	EDTA Plasma	1 Stunde	N/A	1 Jahr	Blutentnahme nach 30 Min. ruhen (liegend/aufrecht mit unterschiedlichen		Chemilumineszenz-Immunoassay	Liaison XL	ng/l
SCC (Abbott)	1677.00	27	Trenngel Serum	Serum	N/A	1 Tag	1 Monat			Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I	µg/l
SHBG	1668.00	27	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	3 Monate			Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I	nmol/l
Testosteron	1694.00	17.4	Trenngel Serum	Serum	8 Stunden	7 Tage	1 Jahr	Blutentnahme zwischen 8 und 10 Uhr.		Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I	nmol/l
Theophyllin	1696.00	14.3	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	1 Tag	7 Tage	2 Monate	Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Tatspiegel)		Enzym-Immunoassay	Alinity C	µmol/l
Thyreoglobulin	1717.00	39.6	Trenngel Serum	Serum	3 Tage	7 Tage	1 Jahr	Zusätzlich wird ein Wiederfindungstest durchgeführt, um mögliche Interferenzen durch		Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I	µg/l
Tobramycin	1062.00	29.7	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	N/A	3 Tage	1 Monat	Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Tatspiegel) oder unmittelbar nach Ende der		Immunturbidimetrie	Alinity C	mg/l
TPA (DiaSorin)	1723.00	42.3	Trenngel Serum	Serum	N/A	1 Tag	3 Monate			Chemilumineszenz-Immunoassay	Liaison XL	U/l
TSH	1718.10	8.1	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	7 Tage	6 Monate			Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I	mU/l
Valproat	1070.00	14.3	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	N/A	2 Tage	7 Tage	Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Tatspiegel)		Immunturbidimetrie	Alinity C	µmol/l
Vancomycin	1062.00	29.7	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	2 Stunden	2 Tage	14 Tage	Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Tatspiegel)		Immunturbidimetrie	Alinity C	mg/l
Vitamin B12	1749.00	22.5	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	3 Tage	3 Monate			Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I	pmol/l
Vitamin D, 1,25-diOH-	1000.00	76.5	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	7 Tage	1 Jahr			Chemilumineszenz-Immunoassay	Liaison XL	pmol/l
Vitamin D, 25-OH-	1006.00	47.7	Trenngel Serum	Serum	7 Tage	1 Monat	1 Jahr			Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I	nmol/l