

Analysenname (Bezeichnung * - Extern)	BAG Abrechnungssposition	Tax- Punkte	Primär- Röhrchen	Probe	Suchtstoff Raum- temperatur	Satibilität 4°C	Stabilität -20°C	Zusätzliche präanalytische Information	Methode	GezSt
ACTH	1239.00	61.2	EDTA-Röhrchen	EDTA Plasma gefroren	1 Stunde	6 Stunden	1 Monat	Sofort nach der Blutentnahme zentrifugieren und EDTA-Plasma abpipettieren und einfrieren.	Chemilumineszenz- Immunoassay	Liaison XL
AFP (Abbott)	1034.00	17.4	Trenngel Serum	Serum	3 Tage	7 Tage	1 Jahr		Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I
Albumin	1021.00	2.3	Trenngel Serum	Serum	7 Tage	7 Tage	3 Monate		Kolorimetrische Methode (Bromkresolgrün)	Alinity C
Albumin im Sammelurin	1023.00	10.8	Urin 24h/Sammel nativ	Urin	7 Tage	1 Monat	6 Monate		Kolorimetrische Methode (Bromkresolgrün)	Alinity C
Albumin im Spontanurin	1023.00	10.8	Urin Spontan nativ	Urin	7 Tage	1 Monat	6 Monate	Zusätzlich wird Kreatinin im Urin gemessen und Albumin/Kreatinin-Quotient berechnet.	Immunurbidimetrie	Alinity C
Aldosteron (DiaSorin)	1026.00	27.0	EDTA-Röhrchen	EDTA Plasma gefroren	1 Stunde	N/A	1 Jahr	Blutentnahme zwischen 7 und 10 Uhr am Morgen nach 30 Min. ruhen (liegend/aufrecht mit unterschiedlichen Referenzbereichen).	Chemilumineszenz- Immunoassay	Liaison XL
Aldosteron-Renin-Quotient	-	-	EDTA-Röhrchen	EDTA Plasma gefroren				Blutentnahme zwischen 7 und 10 Uhr am Morgen nach 30 Min. ruhen (liegend/aufrecht mit unterschiedlichen Referenzbereichen). Probe sofort nach der Blutentnahme zentrifugieren und EDTA-Plasma abpipettieren und einfrieren. Probe darf nicht bei 4°C aufbewahrt werden.		Liaison XL
Alkalische Phosphatase	1027.00	2.3	Trenngel Serum	Serum	7 Tage	7 Tage	2 Monate		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Alpha-1-Antitrypsin	1032.00	20.7	Trenngel Serum	Serum	7 Tage	7 Tage	3 Monate	Zusätzlich wird CRP gemessen um eine Akute-Phase-Reaktion auszuschliessen (Alpha-1-Antitrypsin steigt an).	Immunurbidimetrie	Alinity C
ALT	1020.00	2.3	Trenngel Serum	Serum	3 Tage	7 Tage	1 Jahr		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Amlakacin	1062.00	29.7	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	8 Stunden	2 Tage	3 Monate	Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Talspiegell) oder unmittelbar nach Ende der Infusion (Spitzenspiegel).	Immunurbidimetrie	Alinity C
Ammoniak	1045.00	37.8	EDTA-Röhrchen	EDTA Plasma	N/A	2 Stunden	21 Tage	Sofort nach der Blutentnahme zentrifugieren und EDTA-Plasma abpipettieren und einfrieren.	Kolorimetrische Methode	Alinity C
Amphetamine Screen	1686.00	17.5	Urin-Röhrchen	Urin	2 Tage	5 Tage	6 Monate	Gemäss Empfehlungen der SCDAT (www.sccc.ch/scdat) wird bei Screeningtests auf Suchtstoffe jeweils die Kreatininkonzentration bestimmt (Prüfung der Probenintegrität).	Enzym-Immunoassay	Alinity C
Amylase	1047.00	2.3	Trenngel Serum	Serum	7 Tage	7 Tage	1 Jahr		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Androstendion	1055.00	27.0	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	14 Tage	1 Jahr		Chemilumineszenz- Immunoassay	Liaison XL
Anti-CCP	1108.00	25.2	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	1 Woche	3 Monate		Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I
Anti-Müller-Hormon*	1426.00	54.9	Trenngel Serum	Serum	3 Tage	5 Tage	6 Monate		Chemilumineszenz- Immunoassay	Extern - LG1
Anti-TG	1186.00	15.1	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	3 Tage	1 Monat		Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I
Anti-TPO	1188.10	15.1	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	3 Tage	1 Monat		Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I
Apolipoprotein A1	1087.00	17.9	Trenngel Serum	Serum	3 Tage	3 Tage	3 Monate		Immunurbidimetrie	Alinity C
Apolipoprotein B	1088.00	17.9	Trenngel Serum	Serum	3 Tage	3 Tage	3 Monate		Immunurbidimetrie	Alinity C
aPTT	1019.00	7.8	Citrat-Röhrchen 1:10	Citrat Plasma	6 Stunden	n.z.t.	1 Monat		Clotting Methode	ACL TOP
AST	1093.00	2.3	Trenngel Serum	Serum	4 Tage	7 Tage	1 Jahr		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Barbiturate Screen	1686.00	17.5	Urin-Röhrchen	Urin	2 Tage	5 Tage	3 Monate	Gemäss Empfehlungen der SCDAT (www.sccc.ch/scdat) wird bei Screeningtests auf Suchtstoffe jeweils die Kreatininkonzentration bestimmt (Prüfung der Probenintegrität).	Enzym-Immunoassay	Alinity C
Benzodiazepine Screen	1686.00	17.5	Urin-Röhrchen	Urin	2 Tage	7 Tage	3 Monate	Gemäss Empfehlungen der SCDAT (www.sccc.ch/scdat) wird bei Screeningtests auf Suchtstoffe jeweils die Kreatininkonzentration bestimmt (Prüfung der Probenintegrität).	Enzym-Immunoassay	Alinity C
Beta-2-Mikroglobulin (Abbott)	1201.00	13.3	Trenngel Serum	Serum	N/A	7 Tage	1 Jahr		Immunurbidimetrie	Alinity C
Bilirubin direkt	1206.00	3.2	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	3 Monate		Kolorimetrische Methode (Diazo-Reaktion)	Alinity C
Bilirubin total	1207.00	2.9	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	7 Tage	3 Monate		Kolorimetrische Methode (Diazo-Reaktion)	Alinity C
c1 Penicilloyl G, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
c2 Penicilloyl V, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
c202 Suxamethonium (succinylcholine), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
c260 Quarternäres Ammonium, Morphin, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
cB1 Phosdox, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
c5 Ampicilloyl, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
c8 Amoxicilloyl, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
c7 Cefactor, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
c72 Insulin (Human), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
c74 Ceftriaxone, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
c8 Chlorhexidin, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
CA 125 (Abbott)	1216.00	21.6	Trenngel Serum	Serum	3 Tage	5 Tage	3 Monate		Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I
CA 15-3 (Abbott)	1217.00	18.0	Trenngel Serum	Serum	3 Tage	5 Tage	3 Monate		Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I
CA 19-9 (Abbott)	1218.00	21.6	Trenngel Serum	Serum	7 Tage	1 Monate	3 Monate		Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I
Calcitonin	1221.00	54.0	Trenngel Serum	Serum gekühlt	2 Stunden	19 Stunden	15 Tage	Sofort nach der Blutentnahme zentrifugieren und Serum abpipettieren und einfrieren.	Chemilumineszenz- Immunoassay	Liaison XL
Calcium	1223.00	2.5	Trenngel Serum	Serum	2 Monate	5 Monate	6 Monate	Zusätzlich wird Albumin gemessen und albuminkorrigiertes Calcium berechnet.	Kolorimetrische Methode (Arsenazo)	Alinity C
Calcium im Sammelurin	1223.00	2.5	Urin 24h/Sammel HCl	Urin-HCl	2 Tage	6 Tage	6 Monate		Kolorimetrische Methode (Arsenazo)	Alinity C
Calcium im Spontanurin	1223.00	2.5	Urin Spontan nativ	Urin	2 Tage	6 Tage	6 Monate		Kolorimetrische Methode (Arsenazo)	Alinity C
Calprotectin im Stuhl	1224.10	54.9	Stuhl-Röhrchen	Stuhl	8 Stunden	3 Tage	3 Monate		Chemilumineszenz- Immunoassay	Liaison XL
Cannabis/THC Screen	1686.00	17.5	Urin-Röhrchen	Urin	2 Tage	7 Tage	3 Monate	Gemäss Empfehlungen der SCDAT (www.sccc.ch/scdat) wird bei Screeningtests auf Suchtstoffe jeweils die Kreatininkonzentration bestimmt (Prüfung der Probenintegrität).	Enzym-Immunoassay	Alinity C
Carbamazepin	1070.00	14.3	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	2 Tage	7 Tage	3 Monate	Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Talspiegell).	Immunurbidimetrie	Alinity C
CD7*	1226.00	68.4	Trenngel Serum	Serum	48 Stunden	10 Tage	12 Monate		Kapillarelektrophorese	Extern - LG1
CEA (Abbott)	1227.00	18.0	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	7 Tage	6 Monate		Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I
Chlorid	1229.00	2.9	Trenngel Serum	Serum	7 Tage	7 Tage	1 Jahr		Ionen selektive Elektrode	Alinity C
Chlorid im Sammelurin	1229.00	2.9	Urin 24h/Sammel nativ	Urin	2 Tage	7 Tage	7 Tage		Ionen selektive Elektrode	Alinity C
Chlorid im Spontanurin	1229.00	2.9	Urin Spontan nativ	Urin	2 Tage	7 Tage	7 Tage		Ionen selektive Elektrode	Alinity C
Cholesterol	1230.00	2.3	Trenngel Serum	Serum	7 Tage	7 Tage	3 Monate		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Cholinesterase*	1231.00	4.5	Trenngel Serum	Serum	6 Stunden	7 Tage	12 Monate		Kolorimetrische Methode	Extern - LG1
Cocain Screen	1686.00	17.5	Urin-Röhrchen	Urin	2 Tage	7 Tage	3 Monate	Gemäss Empfehlungen der SCDAT (www.sccc.ch/scdat) wird bei Screeningtests auf Suchtstoffe jeweils die Kreatininkonzentration bestimmt (Prüfung der Probenintegrität).	Enzym-Immunoassay	Alinity C
Coenoloplasmin	1220.00	17.9	Trenngel Serum	Serum	8 Tage	14 Tage	1 Jahr		Immunurbidimetrie	Alinity C
Cortisol (17-19 Uhr)	1240.10	17.4	Trenngel Serum	Serum	8 Stunde	2 Tage	6 Monate	Blutentnahme zwischen 17 und 19 Uhr am Abend.	Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I
Cortisol (7-9 Uhr)	1240.10	17.4	Trenngel Serum	Serum	8 Stunde	2 Tage	6 Monate	Blutentnahme zwischen 7 und 9 Uhr am Morgen.	Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I
C-Peptid	1244.00	33.3	Trenngel Serum	Serum	N/A	1 Tag	3 Monate	Blutentnahme nüchtern.	Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I
Creatinkinase (CK)	1249.00	2.3	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Monat		Kolorimetrische Methode	Alinity C
CRP	1245.00	9.0	Trenngel Serum	Serum	15 Tage	2 Monate	1 Jahre		Immunurbidimetrie	Alinity C
CTX (beta-Crosslaps)*	1691.00	33.3	EDTA-Röhrchen	EDTA Plasma	1 Tag	8 Tage	3 Monate	Blutentnahme zwischen 8 und 10 Uhr.		Extern - LDSGW
Cyclosporin	1470.00	49.5	EDTA-Röhrchen	EDTA-Vollblut	2 Tage	2 Wochen	3 Monate		Chemilumineszenz- Immunoassay	Cobas
CYP19A 21-1 (Abbott)	1255.00	39.6	Trenngel Serum	Serum	7 Tage	1 Monat	1 Jahr		Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I
Cystatin C	1257.00	18.9	Trenngel Serum	Serum	14 Tage	21 Tage	6 Monate	Zusätzlich wird die eGFR berechnet.	Immunurbidimetrie	Alinity C
d1 Dermatophagoides pteronyssinus, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
d2 Dermatophagoides farinae, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
d201 Blomia tropicalis, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
d202 rDer p 1, D. pteronyssinus, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
d203 rDer p 2, D. pteronyssinus, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
d205 rDer p 10, D. pteronyssinus, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
d209 rDer p 25, D. pteronyssinus, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
d3 Dermatophagoides microceras, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
d70 Acaar sio (Vorratsmilbe), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
d71 Lepidoglyphus destructor, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
d72 Tyrophagus putrescentiae, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
d73 Glycophagus domesticus (Vorratsmilbe), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
d74 Euroglyphus maynei, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
D-Dimere	1260.00	28.8	Citrat-Röhrchen 1:10	Citrat Plasma	24 Stunden	n.z.t.	1 Monat		Latex-Immunoassay	ACL TOP
DHEAS	1262.00	21.6	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	8 Tage	2 Monate		Chemilumineszenz- Immunoassay	Alinity I
Differentiel Blutbild (mikroskopisch)	1266.00	23.4	EDTA-Röhrchen (ohne Gel)	EDTA Vollblut	24 Stunden	24 Stunden	n. z.		Mikroskopie	Mikroskop
Digoxin	1267.00	9.9	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	N/A	2 Tage	7 Tage	Blutentnahme 6-8 Stunden nach der letzten Dosis.	Immunurbidimetrie	Alinity C
Dysmorphie Erythrozyten	1675.00	10.5	Urin Spontan nativ	Urin	2 Stunden				Mikroskopie	Mikroskopie
e1 Katzeneschuppen/-epithel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
e 101 rCan 11, Hund, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
e 102 rCan 12, Hund, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
e200 Kanarieneiweisskot, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
e201 Kanarieneiweissei, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
e203 Nezzeseiweiss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250

e204 Rinderserumalbumin rIBos dB, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e206 Kaninchenserumprotein, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e208 Chinchillapfel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e209 Wollenspergelmussepithel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e211 Kaninchensurinprotein, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e212 Schweinerurinprotein, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e213 Papageierfedern, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e214 Finkenfedern, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e215 Taubenfedern, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e217 Frettchenepithel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e218 Hühnerkot, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e219 Hühnerserumprotein, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e220 Fiel e2, Katze, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e221 nCan 13, Hund, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e222 nSus s PSA, Schwein, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e226 nCan 15, Hund, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e227 Fiel e3, Pferd, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e229 nFiel e4, Katze, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e229 nCan 14, Hund, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e230 nCan 16, Hund, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e231 Fiel e7, Katze, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e3 Pferdeepithel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e4 Rinderschuppen, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e5 Hundeschuppen, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e6 Meerschweinchenepithel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e7 Gänsefedern, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e7a Mäuseepithel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e72 Mäuseurinprotein, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e73 Rattenepithel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e74 Rattenurinprotein, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e75 Rattenurinprotein, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e76 Mäuseurinprotein, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e77 Wellensittichkot, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e78 Wellensittichfedern, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e82 Ziegenepithel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e81 Schafepithel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e82 Kanincheneppithel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e83 Schweinepithel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e84 Hamsterpithel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e85 Hühnerfedern, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e86 Entenfedern, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e87 Ratte (Epithel u. Protein), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e88 Maus (Epithel u. Protein), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e89 Truthahnpedern, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
e94 Fiel e1, Katze, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250	
EDDP (Methadon-Metabolit) Screen	1686.00	17.5	Urin-Röhrchen	Urin	2 Tage	7 Tage	3 Monate	Gemäss Empfehlungen der SCDAT (www.ssc.ch/scdat) wird bei Screeningtests auf Suchtstoffe jeweils die Kreatininkonzentration bestimmt (Prüfung der Proteinintegrität).	Enzym-Immunoassay Alinity C	
Eisen	1270.00	2.5	Trenngel Serum	Serum	7 Tage	3 Wochen	1 Jahre	Blutentnahme nüchtern.	Kolorimetrische Methode Alinity C	
Estradiol (Diasorin)	1307.00	17.4	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	5 Tage	1 Jahre	Das Medikament Fulvestrant (Faslodes [®]) kann zu falsch hohen Estradiol-Ergebnissen führen.	Chemilumineszenz-Immunoassay Liaison XL	
Everolimus	3470.00	49.5	EDTA-Röhrchen	EDTA-Vollblut	2 Tage	2 Wochen	3 Monate		Chemilumineszenz-Immunoassay Cobas	
ex1 Epitheliemischung 1, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: e1 Katzeneschuppen/-epithelen, e3 Pferdeepithel, e4 Rinderschuppen, e5 Hundeschuppen	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ex2 Epitheliemischung 2, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: e1 Katzeneschuppen, e5 Hundeschuppen, e6 Meerschweinchenepithel, e87 Ratte Epithel u. Prot., e88 Maus Epithel u. Prot.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ex70 Nagermischung, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: e6 Meerschweinchenepithel, e85 Kanincheneppithel, e84 Hamsterpithel, e87 Rattenepithel und Proteine, e88 Mäuseepithel und Proteine	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ex71 Federermischung 1, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: e70 Gänsefedern, e86 Hühnerfedern, e88 Finkenfedern, e89 Truthahnfedern	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ex72 Käfigvolgmischung, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: e78 Wellensittichfedern, e106 Nymphensittichfedern, e201 Kanarienvogelfedern, e213 Papageierfedern, e214 Finkenfedern	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i1 Hühnerfleisch (Ektar), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i10 Sesamöl, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i11 Buchweizenmehl, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i118 Zucchini, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i12 Erbsen, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i124 Dinkel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i13 Erdnuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i14 Sojabohne, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i15 Weisses Bohne, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i17 Haselnuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i18 Paranuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i20 Mischweiss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i20 Mandel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i201 Pekannuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i202 Cashew Nuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i203 Pistazie, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i204 Regenbogenforelle, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i205 Hering, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i206 Makrele, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i207 Venusmuschel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i208 Zitrone, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i209 Grapefruit, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i210 Ananas, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i211 Brombeere, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i212 Champignon, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i213 Kaninchenfleisch, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i214 Spinalt, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i215 Kopfsalat, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i216 Kohl, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i217 Rosenkohl, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i218 Paprika (Peperoni), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i220 Zimt, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i221 Kaffee, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i222 Tee, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i224 Mohrsamen, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i225 Kürbis, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i226 Kürbissamen, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i227 Zuckerrübensamen, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i23 Krebs, Krabbe, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i231 Milch, gekocht, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i232 Goat e2, Ovalbumin, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i233 Goat e1, Ovomucoid, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i234 Vanille, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i235 Linsen, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i236 Molke, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i237 Aprikose, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i24 Gurmele (Kevonde), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i242 Kirsche, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i244 Gurke, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i245 Hühnerlei (1 + 75), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i246 Quark, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i25 Tomate, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i253 Pinienkerne, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i254 Scholle, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i255 Plaurme, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i256 Walnuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i258 Tintenfisch (Atlantik), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i259 Weintraube, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i26 Schweinefleisch, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i260 Broccoli, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i261 Spargel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i262 Aubergine, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i263 Pfeffer, grün, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i265 Kümmel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage				

ix097 Dummi arabicum, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix290 Eoskstante, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix1 Dorsch (Kabeljau), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix300 Ziegenmilch, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix01 Kalbfleisch, Perennin, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix02 Mandarin/Clementine, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix03 Heilbutt, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix04 Languste, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix05 Bockstommes, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix06 Limone, Lemette, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix07 Seehund, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix08 Sardine, Mittelmeer, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix09 Kicherbohne, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix11 Kante, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix11 Plattfisch, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix12 Scherfisch, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix13 Sardelle, Anchovis, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix14 Schnecke (Helix aspersa), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix15 Bohne, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix16 Rapsamen, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix17 Korander, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix18 Rote Beete, Rote Rübe, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix20 Fenchel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix22 Göl 3, Conabum, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix25 Schafstisch, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix26 Schafstischmole, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix28 Fage, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix29 Wasserdill, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix3 Orange, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix32 Minze, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix33 Leinsamen, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix35 Linsen Samen, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix37 Sesam, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix38 Jakobsmuschel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix40 Karmelrot (E120), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix41 Preiselbeere/Cranberry, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix42 Olive, schwarze, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix43 Himbeere, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix45 Macadamia-Nuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix46 Abalone (Seehörn), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix47 Quinoa, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix5 Kartoffel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix51 Pen 1, Krustentiere, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix52 Ara h 8, Erdnuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix53 Gly m 4, Soja, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix54 Bir c 1, Paranuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix55 Cyp c 1, Karphen, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix56 Kokosnuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix59 Getupfelter Gabelweiss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix7 Meeresmuschel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix81 Roter Schnapper, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix84 Weisslachs, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix Weizenmehl, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix0 Thunfisch, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix1 Lachs, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix13 Seelachs/Köhler, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix14 Buntbarsch/Viktariabarsch, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix15 Amerikanischer Zander, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix16 Omega-3-Öl/Gladioli (F1 a 19, Weizen, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix17 Ara h 3, Sellerie, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix19 Pru p 1, Pfirsich, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix2 Scherfisch, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix20 Pru p 3, Pfirsich, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix21 Pru p 4, Pfirsich, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix22 Ara h 1, Erdnuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix23 Ara h 2, Erdnuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix24 Ara h 3, Erdnuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix25 Cor a 8, Haselnuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix26 Ara h 1, Dorsch/Kabeljau, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix27 Ara h 9, Erdnuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix28 Cor a 1, Haselnuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix30 Act d 4, Kavi, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix31 Gly m 5, Soja, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix32 Gly m 6, Soja, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix33 Frit a 14, Weizen, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix34 Mal d 1, Apfel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix35 Mal d 3, Apfel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix36 Cor a 14, Haselnuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix4 Erdbeere, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix40 nCor a 9, Haselnuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix41 nCor a 9, Haselnuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix42 nCor a 9, Haselnuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix43 Ara h 5, Cashewnuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix44 Ara h 6, Erdnuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix45 Pru p 1, Pfirsich, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix46 Backenhefe, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix47 Pru p 2, Pfirsich, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix48 Knoblauch, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix49 Zwiebel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix49 Apfel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix50 Weizenmehl, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix50 Spanische Makrele, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix51 Bambusspross, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix54 Südkastanien, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix55 Rispennuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix56 Kollidien, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix58 Trierfisch (Pazifisch), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix59 Oktopus, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix6 Gerstenmehl, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix60 Bestandteile, Holzmaikrele, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix61 Sardine (Pazifisch), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix7 Hafer, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix75 Hühnerfleisch, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix76 nRibos d 4, Alpha-Lactalbumin, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix77 nRibos d 5, Beta-Lactoglobulin, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix78 nRibos d 8, Kasein, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix79 Gluten, Gliadin, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix8 Mais, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix80 Nudeln, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix81 Cheddarkäse, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix82 Schimmelkäse, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix83 Hühnerfleisch, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix84 Kavi, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix85 Sellerie, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix86 Petersilie, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix87 Melone, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix88 Hammetfleisch, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix89 Senf, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix90 Reis, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix90 Mais, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix91 Mango, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix92 Banane, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
ix93 Kirsche, IgE	1446.10	32.4	T						

fx2 Meerestrichmischung, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f3 Dorsch, f24 Garnele, f23 Miesmuschel, f40 Thunfisch, f41 Lachs	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx20 Nahrungsmittelmischung 9, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f4 Weizenmehl, f5 Roggenmehl, f6 Gersteneiweiß, f9 Reis	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx21 Obstmischung 4, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f84 Kiwi, f87 Melone, f92 Banane, f95 Pfirsich, f210 Ananas	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx22 Nussmischung 2, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f201 Pekannuss, f202 Cashewnuss, f203 Pistazie, f206 Walnuss	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx24 Nahrungsmittelmischung 10, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f17 Haselnuss, f24 Garnele, f84 Kiwi, f92 Banane	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx25 Nahrungsmittelmischung 11, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f10 Sesamsamen, f45 Hefe, f47 Knoblauch, f83 Sellerie	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx26 Nahrungsmittelmischung 26, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f1 Eiweiß Eigelb/Ei, f2 Kuhmilch, f13 Erdnuss, f89 Senf	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx27 Nahrungsmittelmischung 27, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f3 Fisch Kabeljau, f4 Weizen, f14 Sojabohne, f17 Haselnuss	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx28 Nahrungsmittelmischung 28, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f10 Sesamsamen, f24 Shrimps Garnelen, f27 Rindfleisch, f84 Kiwi	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx29 Zitrusmischung, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f103 Orange, f208 Zitrone, f209 Grapefruit, f202 Mandarine	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx3 Getreidemischung 1, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f4 Weizenmehl, f7 Hafermehl, f8 Maismehl, f10 Sesamschrot, f11 Buchweizenmehl	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx30 Obstmischung, Latex-assoziiert, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Lo Mischungung include i sequenti allergien f84 Kiwi, f91 Mango, f92 Banane, f96 Avocado, f293 Papaya	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx31 Obstmischung, Birkenpollen-assoziiert, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f49 Apfel, f94 Birne, f91 Birne, f95 Pfirsich, f242 Kirsche, f255 Pflaume	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx5 Nahrungsmittelscreen, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f1 Hühnerfleisch, f2 Milchprotein, f3 Dorsch, f4 Weizenmehl, f13 Erdnuss, f14 Sojabohne	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx7 Nahrungsmittelmischung 1, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f25 Tomate, f45 Hefe, f47 Knochfleisch, f48 Zwiebel, f85 Sellerie	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx70 Gewürzmischung 1, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f272 Estragon, f273 Thymian, f274 Majoran, f275 Liebstöckel	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx71 Gewürzmischung 2, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f265 Kummel, f266 Muskatblüte, f267 Kardamom, f268 Gewürznelke	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx73 Fleischmischung 2, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f26 Schweinefleisch, f27 Rindfleisch, f83 Huhnfleisch	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx74 Fischmischung, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f3 Dorsch, f205 Heering, f206 Makrele, f254 Scholle	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
fx77 Nahrungsmittelmischung 29, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: f10 Sesamsamen, f17 Haselnuss, f25 Tomate, f84 Kiwi, f202 Cashewnuss	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g1 Ruchgras, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g10 Hirse, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g11 Trespel, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g12 Roggen, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g13 Wolliges Honiggras, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g14 Hafer, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g15 Weizen, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g16 Wiesenschwingel, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g17 Bahiagrass, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g2 Hundszahngras, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g201 Gerste, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g202 Mais, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g205 -PHI p 1, Lieschgras, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g206 -PHI p 2, Lieschgras, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g208 -nPHI p4, Lieschgras, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g209 -PHI p 6, Lieschgras, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g210 -PHI p 7, Lieschgras, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g211 -PHI p 11, Lieschgras, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g212 -PHI p 12, Lieschgras, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g213 -PHI p 1, -PHI p 5b, Lieschgras, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g214 -PHI p 7, -PHI p 12, Lieschgras, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g215 -PHI p 5, Lieschgras, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g216 -nCyM d 1, Hundszahngras, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g3 Knäuelgras, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g4 Wiesenschwingel, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g5 Lolch, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g6 Lieschgras, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g7 Schirf, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g70 Haarjerste, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g71 Rohrkolbgras/Canary-Gras, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g205 Wiesenspergels, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
g9 Weisses Straußgras, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
Galektin-3	1474.10	78.3	Trennigel Serum	Serum					Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
Gallensäuren total	1340.00	54.0	Trennigel Serum	Serum	1 Tag	7 Tage	1 Jahr		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Gentamicin	1062.00	29.7	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	N/A	7 Tage	30 Tage	Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Talspiegel) oder unmittelbar nach Ende der Infusion (Spitzenspiegel)	Immunturbidimetrie	Alinity C
GGT	1341.00	2.3	Trennigel Serum	Serum	7 Tage	7 Tage	1 Jahre		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Glucose	1356.00	2.3	Fluorid Röhrenchen	Fluorid Plasma	3 Tage	1 Woche	N/A	Glucose wird in nicht-zentrifugiertem Vollblut abgebut. Bevorzugtes Material Fluoridröhrchen. Alternativ das Serum innerhalb von einigen Stunden abtrennen.	Kolorimetrische Methode	Alinity C
Glucose im Sammelurin	1509.00	2.3	Urin 24h-Sammel HCl	Urin-HCl	2 Stunde	2 Stunde	2 Tage		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Glucose im Spontanurin	1509.00	2.3	Urin Spontan HCl	Urin-HCl	2 Stunde	2 Stunde	2 Tage		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Grosses Blutbild (Hämatogramm V)	1374.00	13.1	EDTA-Röhrchen	EDTA Vollblut	24 Stunden	24 Stunden	n.z.		Fluoreszenz-Durchflusszytometrie	Sysmex XR-1000
gx1 Gräser/Frühhöher, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: g3 Knaeuelsgras, g4 Wiesenschwingel, g5 Lolch, g6 Lieschgras, g8 Wiesenspergels, g10 Mohrenhirse, g17 Bahiagrass	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
gx2 Gräsermischung 1, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: g2 Hundszahngras, g5 Lolch, g6 Lieschgras, g8 Wiesenspergels, g10 Mohrenhirse, g17 Bahiagrass	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
gx3 Gräsermischung 2, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: g1 Ruchgras, g5 Lolch, g6 Lieschgras, g12 Roggen, g13 Wolliges Honiggras	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
gx4 Gräser/Späthöher, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: g1 Ruchgras, g5 Lolch, g7 Schirf, g12 Roggen, g13 Wolliges Honiggras	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
gx6 Gräsermischung 3, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: g2 Hundszahngras, g5 Deutsches Weidelgras, g10 Johnson-Gras, g11 Glattfalter, g13 Wolliges Honiggras, g17 Paspalumgras	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
h1 Hausstaub, Greer Labs, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
h2 Hausstaub Hollister-Stier Labs, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
Haptoglobin	1405.00	17.9	Trennigel Serum	Serum	3 Monate	8 Monate	3 Monate	in-vitro Hämolysie stört.	Immunturbidimetrie	Extern - LG1
Harnsäure	1738.00	2.5	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Monat		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Harnsäure im Sammelurin	1738.00	2.5	Urin 24h-Sammel nativ	Urin	2 Tage	N/A	N/A		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Harnsäure im Spontanurin	1738.00	2.5	Urin Spontan nativ	Urin	2 Tage	N/A	N/A		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Harnstoff	1406.00	2.3	Trennigel Serum	Serum	7 Tage	7 Tage	1 Jahre		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Harnstoff im Sammelurin	1406.00	2.3	Urin 24h-Sammel nativ	Urin	2 Tage	7 Tage	1 Monat		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Harnstoff im Spontanurin	1406.00	2.3	Urin Spontan nativ	Urin	2 Tage	7 Tage	1 Monat		Kolorimetrische Methode	Alinity C
HbA1c	1363.00	16.0	EDTA-Röhrchen	EDTA Vollblut	2 Tage	7 Tage	N/A		Kolorimetrische Methode (enzymatisch)	Alinity C
HCG im Serum (Schwangerschaft)	1425.00	15.8	Trennigel Serum	Serum	1 Tag	7 Tage	1 Jahr		Chemilumineszenz-Immunoassay	Liason XL
HCG Tumormarker (DiäSorin)	1425.00	15.8	Trennigel Serum	Serum	1 Tag	7 Tage	1 Jahr		Chemilumineszenz-Immunoassay	Liason XL
HDL-Cholesterin	1410.10	2.9	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	3 Monate		Kolorimetrische Methode (direkte HDL-Bestimmung)	Alinity C
HE4 (Abbott)			Trennigel Serum	Serum	1 Tag	4 Tage	6 Tage		Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I
HGH (Wachstumshormon)	1761.00	61.2	Trennigel Serum	Serum	N/A	1 Tag	3 Monate		Chemilumineszenz-Immunoassay	Liason XL
Holotranscobalamin	1727.10	54.9	Trennigel Serum	Serum	1 Tag	3 Tage	3 Monate		Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I
HOMA-Index	-	-								Alinity I
Homocystein	1422.00	27.0	Fluorid Röhrenchen	Fluorid Plasma	N/A	14 Tage	1 Jahr	Blutentnahme nüchtern. Bevorzugtes Material Fluoridröhrchen, da Homocystein in nicht-zentrifugiertem Vollblut ansteigt.	Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I
hx2 Hausstaubmischung, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: h2 Hollister-Stier Labs, d1 Dermat. pteromyssinus, d2 Dermat. farinae, f6 Küchenschabe	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i1 Bienengift, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i2 Wespenkopfwespengift, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i203 Motmotgift, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i204 Pferdelliege, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i205 Hummelgift, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i206 Schabe, amerikan., IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i209 -Api m 1, Bienengift, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i209 -Nes v 5, Wespengift, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i210 -Pol d5, Feldwespengift, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i211 -Nes v 1, Wespengift, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i214 -Api m 2, Bienengift, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i215 -Api m 3, Bienengift, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i216 -Api m 5, Bienengift, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i217 -Api m 10, Bienengift, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i3 Wespengift, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i4 Papierwespengift, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i4 Grillwespengift, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i6 Küchenschabe, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i70 Feuerreisse, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i71 Stechmücke, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i73 Rote Mückenlarve, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
i75 Hornissen Gift, europäisch, IgE	1446.1									

Interleukin-6*	1474.10	78.3	Trennigel Serum	Serum	1 Tag	1 Woche	3 Wochen		Chemilumineszenz-Immunoassay	Cobas
k202 Isha c 2, Bromelin, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k208 kcal/c4, Lycopoz, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k215 Hhev b 1, Latex, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k217 Hhev b 3, Latex, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k218 Hhev b 5, Latex, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k220 Hhev b 6, Latex, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k221 Hhev b 8, Latex, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k224 Hhev b 11, Latex, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k72 Isapaghula, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k75 Isocyanat TD, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k76 Isocyanat MDI, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k77 Isocyanat HDI, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k78 Ethylenoxid, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k79 Phthalisäureanhydrid, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k80 Formaldehyd (Formalin), IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k81 Ficus spp., IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k82 Latex, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k83 Baumwollsaamen, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k84 Sonnenblumensaamen, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
k87 Asap a 21, Alpha-Amylase, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
Kalium	1479.00	2.5	Trennigel Serum	Serum	42 Tage	42 Tage	1 Jahr	Kalium steigt in nicht-zentrifugiertem Vollblut an. Bereits leichte Hämolyse führt zu falsch-hohe Resultate.	Ionen selektive Elektrode	Alinity C
Kalium im Sammelurin	1479.00	2.5	Urin 24h Sammel nativ	Urin	45 Tage	2 Monate	1 Jahr		Ionen selektive Elektrode	Alinity C
Kalium im Spontanurin	1479.00	2.5	Urin Spontan nativ	Urin	45 Tage	2 Monate	1 Jahr		Ionen selektive Elektrode	Alinity C
Kleines Blutbild (Hämatogramm II)	1371.00	8.1	EDTA-Röhrchen	EDTA Vollblut	24 Stunden	24 Stunden	n. z.		Synex XP-1000	
Komplement C3	1501.10	20.7	Trennigel Serum	Serum	1 Tag	3 Tage	1 Jahr		Immunturbidimetrie	Alinity C
Komplement C4	1503.00	20.7	Trennigel Serum	Serum	1 Tag	3 Tage	3 Monate		Immunturbidimetrie	Alinity C
Kreatinin	1509.00	2.3	Trennigel Serum	Serum	7 Tage	7 Tage	3 Monate	Zusätzlich wird die eGFR berechnet.	Enzymatische Methode	Alinity C
Kreatinin im Sammelurin	1509.00	2.3	Urin Spontan nativ	Urin	2 Tage	6 Tage	6 Monate		Enzymatische Methode	Alinity C
Kreatinin im Spontanurin	1509.00	2.3	Urin Spontan nativ	Urin	2 Tage	6 Tage	6 Monate		Enzymatische Methode	Alinity C
Laktat	1517.00	20.7	Fluorid Röhrchen	Fluorid Plasma	3 Tage	6 Tage	6 Monate		Kolorimetrische Methode	Alinity C
LDH	1518.00	2.3	Trennigel Serum	Serum	7 Tage	4 Tage	6 Monate	Bereits leichte Hämolyse führt zu falsch-hohe Resultate.	Kolorimetrische Methode	Alinity C
LDL-Cholesterin, gemessen	1521.00	3.8	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Kolorimetrische Methode	Alinity C
LY57SH-Ratio*	-	-	Trennigel Serum	Serum	3 Tage	2 Wochen	6 Monate		Berechnung	Extern - LG1
LH*	1542.00	13.3	Trennigel Serum	Serum	3 Tage	2 Wochen	6 Monate		ECCL	Extern - LG1
Lipase	1537.00	4.5	Trennigel Serum	Serum	3 Tage	7 Tage	1 Jahr		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Lithium	1541.00	11.2	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	1 Tag	7 Tage	6 Monate	Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Tatspiegel).	Kolorimetrische Methode	Alinity C
Lyotischer Transferinrezeptor*	1474.10	78.3	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	4 Wochen		ECCL	Extern - LG1
Lp(a)	1539.00	17.9	Trennigel Serum	Serum	1 Tag	8 Tage	1 Jahr		Immunturbidimetrie	Alinity C
m1 Penicillium chrysogenum (P. notatum), IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m10 Stenophyllum herbarum (S. botryosum), IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m11 Rhizopus nigricans, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m12 Aureobasidium pullulans, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m13 Phoma betae, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m14 Epiloccum purpurascens, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m15 Trichoderma viride, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m16 Curvularia lanata, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m2 Cladosporium herbarum, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m201 Tillaria tritici, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m202 Acroterium kilense, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m204 Ustilidium charitum, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m205 Trichophyton rubrum, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m207 Aspergillus niger, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m208 Chaetomium globosum, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m209 Penicillium klabrum, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m211 Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m218 rAsp 1 2, Aspergillus fumigatus, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m219 rAsp 1 2, Aspergillus fumigatus, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m220 rAsp 1 3, Aspergillus fumigatus, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m221 rAsp 1 4, Aspergillus fumigatus, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m222 rAsp 1 6, Aspergillus fumigatus, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m223 Staphylococcal Enterotoxin C, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m226 Staphylococcal Enterotoxin TSS1, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m227 Malassezia spp., IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m228 Aspergillus flavus, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m229 Alt a 1, Alternaria alternata, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m3 Aspergillus fumigatus, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m36 Aspergillus terreus, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m4 Mucor racemosus, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m5 Candida albicans, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m6 Alternaria alternata, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m7 Botrytis cinerea, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m8 Setomelanconium rostrata, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m80 Staphylococcal Enterotoxin A, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m81 Staphylococcal Enterotoxin B, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m9 Fusarium proliferatum (F. moniliforme), IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
Magnesium	1556.00	7.8	Trennigel Serum	Serum	3 Tage	3 Tage	1 Jahr		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Magnesium im Sammelurin	1556.00	7.8	Urin 24h Sammel HCl	Urin-HCl	3 Tage	3 Tage	1 Jahr		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Magnesium im Spontanurin	1556.00	7.8	Urin Spontan HCl	Urin-HCl	3 Tage	3 Tage	1 Jahr		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Methotrexat	1567.00	75.6	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	1 Tag	2 Tage	1 Jahr		Enzym-Immunoassay	Alinity I
m1 Schimmelpilzmischung 1, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: m1 Penicillium chrysogenum P. notatum, m2 Cladosporium herbarum, m3 Aspergillus fumigatus, m6 Alternaria alternata.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m2 Schimmelpilzmischung 2, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: m1 Penicillium chrysogenum P. notatum, m2 Cladosporium herbarum, m3 Aspergillus fumigatus, m5 Candida Albicans, m6 Alternaria alternata, m8 Setomelanconia rostrata.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
m4 Aspergillmischung, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: m3 Aspergillus fumigatus, m5 Candida Albicans, m6 Alternaria alternata, m8 Setomelanconia rostrata.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
Natrium	1574.00	2.3	Trennigel Serum	Serum	14 Tage	14 Tage	1 Jahr		Ionen selektive Elektrode	Alinity C
Natrium im Sammelurin	1574.00	2.3	Urin 24h Sammel nativ	Urin	45 Tage	45 Tage	1 Jahr		Ionen selektive Elektrode	Alinity C
Natrium im Spontanurin	1574.00	2.3	Urin Spontan nativ	Urin	45 Tage	45 Tage	1 Jahr		Ionen selektive Elektrode	Alinity C
Non-HDL-Cholesterin	-	-	Trennigel Serum	Serum	-	-	-		-	-
NSE (Abbott)	1581.00	33.3	Trennigel Serum	Serum	N/A	1 Tag	1 Monat	Bereits leichte Hämolyse führt zu falsch-hohe Resultate.	Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I
NT-proBNP	1576.00	63.0	Trennigel Serum	Serum	3 Tage	6 Tage	1 Jahr		Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I
o1 Baumwolle, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
o211 Mehlwur, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
o214 CCD, MUXF3, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
o215 Hcal-alpha-1,3-Gal (alpha-Gal), IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
o270 Screeningtest, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
Opate Screen	1686.00	17.5	Urin-Röhrchen	Urin	2 Tage	7 Tage	3 Monate	Gemäss Empfehlungen der SDOAT (www.sdocc.ch/sdoat) wird bei Screeningtests auf Suchstoffe jeweils die Kreatininkonzentration bestimmt (Prüfung der Proteinengenüßigkeit).	Enzym-Immunoassay	Alinity C
Osteo (knochenspezifische AP)	1029.00	27.0	Trennigel Serum	Serum	1 Tag	4 Tage	1 Monat		Chemilumineszenz-Immunoassay	Liaison XL
Osteocalcin	1589.00	46.8	Trennigel Serum	Serum	N/A	N/A	6 Monate	Sofort nach der Blutentnahme zentrifugieren und Serum abpipettieren und einfrieren.	Chemilumineszenz-Immunoassay	Liaison XL
p1 Ascaris, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
P-ANP	1622.00	92.5	EDTA-Röhrchen	EDTA Plasma	1 Tag	6 Tage	3 Monate	Blutentnahme zwischen 8 und 10 Uhr.	Enzym-Immunoassay	Extern - LDCO
p4 Anisakis (Fischparasit), IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
Pankreas-Amylase	1592.00	3.2	Trennigel Serum	Serum	8 Stunden	7 Tage	3 Monate		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Pankreas-Elastase im Stuhl	1273.00	47.7	Stuhl-Röhrchen	Stuhl	8 Stunden	7 Tage	3 Monate		Kolorimetrische Methode	Alinity C
PAPP-A	-	-	Trennigel Serum	Serum	N/A	1 Tag	6 Monate		Chemilumineszenz-Immunoassay	Cobas
Pepsinogen I	-	-	Trennigel Serum	Serum	-	-	-		Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I
Pepsinogen III-Ratio	-	-	Trennigel Serum	Serum	-	-	-		Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I
Pepsinogen II	-	-	Trennigel Serum	Serum	-	-	-		Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I
Phenobarbital	1070.00	14.3	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	3 Tage	7 Tage	3 Monate	Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Tatspiegel).	Immunturbidimetrie	Alinity C
Phenol	1070.00	14.3	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	2 Tage	7 Tage	3 Monate	Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Tatspiegel).	Enzym-Immunoassay	Alinity C
Phosphat	1601.00	2.9	Trennigel Serum	Serum	1 Tag	4 Tage	1 Jahr	Phosphat steigt in nicht-zentrifugiertem Vollblut an.	Kolorimetrische Methode	Alinity C
Phosphat im Sammelurin	1601.00	2.9	Urin 24h Sammel HCl	Urin-HCl	2 Tage	1 Woche	6 Monate		Kolorimetrische Methode	Alinity C
Phosphat im Spontanurin	1601.00	2.9	Urin Spontan HCl	Urin-HCl	2 Tage	1 Woche	6 Monate		Kolorimetrische Methode	Alinity C
PLGF	1777.00	144.0	Trennigel Serum	Serum	N/A	2 Tage	6 Monate		Chemilumineszenz-Immunoassay	Cobas
Präalbumin	1615.00	17.9	Trennigel Serum	Serum	3 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunturbidimetrie	Alinity C
Procalcitonin*	1619.00	75.6	Trennigel Serum	Serum	k.A.	48 Stunden	6 Monate		FPFA	Extern
Progesteron	1620.00	17.4	Trennigel Serum	Serum	1 Tag	10 Tage	6 Monat		Chemilumineszenz-Immunoassay	Alinity I
Prolaktin	1623.00	13.3	Trennigel Serum	Serum	1 Tag	7 Tage	1 Jahr	Blut		

Quick / INR	1700.00	5.4	Citrat-Röhrchen 1:10	Citrat Plasma	24 Stunden	n.z.t.	1 Monat		Clotting Methode	ACL TOP
Renin Aktiv (Diasorin)	1648.00	61.2	EDTA-Röhrchen	EDTA Plasma gefahren	1 Stunde	N/A	1 Jahr	Blutentnahme zwischen 7 und 10 Uhr am Morgen nach 30 Min. ruhen (legend)aufrecht mit unterschiedlichen Referenzbereichen). Probe sofort nach der Blutentnahme zentrifugieren und EDTA-Plasma abgetrennt und einfrieren. Probe darf nicht bei 4°C aufbewahrt werden.	Chemilumineszenz-Immunoassay	Liaison XL
Retikulozyten	1649.00	11.9	EDTA-Röhrchen	EDTA Vollblut	48 Stunden	48 Stunden	n. z.		Fluoreszenz-Quarzflusszytometrie	Synnex XR-1000
Rheumafaktor	1654.00	6.7	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	3 Tage	1 Monat		Immunturbidimetrie	Ainity C
rx1 Saisonale Mischung, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: g6 Lieschgras, w6 Beifuß, w9 Spitzwegerich, w21 Glaskraut, t3 Birke.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
rx2 Perenniale Mischung 1, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: e1 Katzenschuppen, e3 Pferdepithel, e5 Hundeschuppen, m6 Alternaria alternata, g2 Dermatophagoides farinae.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
rx3 Sondernischung Pollen, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: g2 Roggen, g5 Wiesensiechgras, g17 Bermuda Gras, w1 Beifuß, w9 Beifuß-Ambrosie, w10 Traubenkraut.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
rx5 Innenraummischung, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: d1 Dermat. pteronyssinus, e1 Katzenschuppen, m3 Aspergillus fumigatus IgE, e6 Küchenschabe.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
rx6 Pollen- und Schimmelpilzmischung, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: t3 Birke, g6 Lieschgras, w6 Beifuß, m2 Cladosporium herbarum, m6 Alternaria alternata.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
rx7 Perenniale Mischung 2, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: d1 Dermatophagoides pteronyssinus, e1 Katzenschuppen, e3 Pferdepithelien, e5 Hundeschuppen, e62 Kaninchenepithelien	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
SCC (Abbott)	1677.00	27.0	Trenngel Serum	Serum	N/A	1 Tag	1 Monat		Chemilumineszenz-Immunoassay	Ainity I
Serum-Proteinelektrophorese ^a	1636.00	27.9	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	7 Tage	1 Monat		Kapillarelektrophorese	Extern - LG1
sFit-1			Trenngel Serum	Serum	N/A	2 Tage	6 Monate		Chemilumineszenz-Immunoassay	Cobas
SHBG	1668.00	27.0	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	3 Monate		Chemilumineszenz-Immunoassay	Ainity I
Sivolum	1470.00	49.5	EDTA-Röhrchen	EDTA-Vollblut	2 Tage	2 Wochen	3 Monate		Chemilumineszenz-Immunoassay	Cobas
sc1 Inhalationscreen, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: d1 Dermatophagoides pteronyssinus, e1 Katzenchuppen, e5 Hundeschuppen, m2 Cladosporium herb., g12 Roggen, w6 Beifuß, g6 Lieschgras, t3 Birke.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t1 Ahorn, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t10 Walnuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t11 Platane, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t12 Salweide, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t14 Pappel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t15 Weiße Esche (Fraxinus americana), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t16 Kiefer (Pinus strobus), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t17 Japanische Zeder, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t18 Eukalyptus, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t19 Langblättrige Akazie, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t21 Erle, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t20 Mesquite, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t201 Fichte, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t203 Rosskastanie, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t205 Holunder, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t208 Eiskirsche, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t208 Linde, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t209 Hainbuche, Weissdorn, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t21 Melaleuca, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t210 Jäger, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t211 Amberbaum, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t212 Zeder, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t213 Kiefer (Pinus radiata), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t214 Dattelpalme, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t215 Birke (Bet v1, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t216 Birke (Bet v2, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t217 Pfefferbaum, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t22 Hickory-Baum, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t220 (Bet v 4, Birke, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t221 (Bet v 2, (Bet v 4, Birke, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t222 Zypresse Arizona, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t224 (Ole e 1, Olive, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t225 (Bet v6, Birke, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t226 (Cup e 1, Zypresse Arizona, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t227 (Ole e 7, Olive, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t23 Zypresse (Cupressus sempervirens), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t240 (Ole e 9, Olive, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t241 (Pla e 1, Platane, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t25 Gemeine Esche, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t3 Birke, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t37 Echte Sumpfzypresse, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t4 Hasel, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t41 Weisses Hickory, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t44 Westlicher Zürgelbaum, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t45 Zedern-Ulme, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t5 Buche, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t55 Bengelginsler, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t56 Gagelstrauch, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t57 Virginische Wacholder, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t6 Sadebaum (Wacholder), IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t7 Erle, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t9 Maulbeerbaum, weiss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t71 Maulbeerbaum, rot, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t72 Palme, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t73 Australische Pinie, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t41 Ulme, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
t9 Olive, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
Tacrolimus	1470.00	49.5	EDTA-Röhrchen	EDTA-Vollblut	2 Tage	2 Wochen	3 Monate		Chemilumineszenz-Immunoassay	Cobas
Testosteron	1694.00	17.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Blutentnahme zwischen 8 und 10 Uhr.	Chemilumineszenz-Immunoassay	Ainity I
Testosteron, frei (berechnet)	-	-	Trenngel Serum	Serum						
Theophyllin	1696.00	14.3	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	1 Tag	7 Tage	2 Monate	Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Tatspiegel).	Enzym-Immunoassay	Ainity C
Thrombinzeit	1699.00	8.8	Citrat-Röhrchen 1:10	Citrat Plasma	6 Stunden	n.z.t.	1 Monat		Clotting Methode	ACL TOP
Thyreoglobulin	1717.00	39.3	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	3 Tage	7 Tage	1 Jahr	Zusätzlich wird ein Wiederfindungstest durchgeführt, um mögliche Interferenzen durch anti-Thyreoglobulin-Autoantikörper auszuschließen.	Immunoassay	Ainity I
Tobramycin	1062.00	29.7	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	N/A	3 Tage	1 Monat	Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Tatspiegel) oder unmittelbar nach Ende der Infusion (Spitzenspiegel).	Immunturbidimetrie	Ainity C
TPA (Diasorin)	1723.00	42.3	Trenngel Serum	Serum	N/A	1 Tag	3 Monate		Chemilumineszenz-Immunoassay	Liaison XL
TRAK	1189.00	28.8	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	14 Tage	1 Jahr		Chemilumineszenz-Immunoassay	Ainity I
Transferrin	1729.00	5.6	Trenngel Serum	Serum	3 Tage	3 Tage	1 Jahr		Immunturbidimetrie	Ainity C
Transferrinsättigung			Trenngel Serum	Serum						
Triglyceride	1731.00	2.5	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	3 Monate		Kolorimetrische Methode	Ainity C
Tropoin I	1734.00	20.7	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	1 Tag	3 Monate		Chemilumineszenz-Immunoassay	Ainity I
TSH	1718.10	8.1	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	7 Tage	6 Monate		Chemilumineszenz-Immunoassay	Ainity I
T-Uptake			Trenngel Serum	Serum					Chemilumineszenz-Immunoassay	Ainity I
tx1 Blümmischung 1, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: t1 Ahorn, t3 Birke, t7 Erle, t8 Ulm, t10 Walnuss.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
tx10 Blümmischung 10, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: t4 Hasel, t2 Erle, t3 Birke, t15 weisse Esche.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
tx4 Blümmischung 4, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: t7 Erle, t8 Ulme, t11 Platane, t12 Salweide, t14 Pappel.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
tx5 Blümmischung 5, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: t2 Erle, t4 Hasel, t8 Ulme, t12 Salweide, t14 Pappel.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
tx6 Blümmischung 6, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: t1 Ahorn, t3 Birke, t5 Buche, t7 Erle, t10 Walnuss.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
tx7 Blümmischung 7, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: t9 Olivenbaum, t12 Weide, t16 Weymouth-Kiefer, t18 Eukalyptus, t19 Akazie, t21 Teufelbaum.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
tx8 Blümmischung 8, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: t1 Ahorn, t3 Birke, t4 Hasel, t7 Erle, t11 Platane.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
tx9 Blümmischung 9, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: t3 Birke, t7 Erle, t2 Erle, t4 Hasel, t12 Salweide.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
Unsediment	1739.00	18.0	Urin Spontan nativ	Urin	12 Stunden	12 Stunden	N/A		Flowzytometrie	Synnex UF-1500
Urinotix	1740.00	0.9	Urin Spontan nativ	Urin	12 Stunden	24 Stunden	N/A		Synnex UC-1000	
Valgact	1070.00	14.3	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	N/A	2 Tage	7 Tage	Blutentnahme im steady state vor der nächsten Dosis (Tatspiegel).	Immunturbidimetrie	Ainity C
Vancocin	1092.00	29.7	Nativ Serum (ohne Gel)	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Tag		Immunturbidimetrie	Ainity C
Vitamin B1*	1748.00	68.4	EDTA-Röhrchen	EDTA Vollblut gefahren	1 Tag	1 Tag	3 Monate	EDTA-Vollblut gefahren einsenden.	Extern - LDSGW	
Vitamin B12	1749.00	22.5	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	3 Tage	3 Monate		Chemilumineszenz-Immunoassay	Ainity I
Vitamin B6*	1751.00	61.2	EDTA-Röhrchen	EDTA Vollblut gefahren	1 Tag	1 Tag	3 Monate	EDTA-Vollblut gefahren einsenden.	Extern - LDSGW	
Vitamin D, 1,25-diOH	1000.00	76.5	Trenngel Serum	Serum	1 Tag	7 Tage	1 Jahr		Chemilumineszenz-Immunoassay	Liaison XL
Vitamin D, 25-OH	1006.00	47.7	Trenngel Serum	Serum	7 Tage	1 Monat	1 Jahr		Chemilumineszenz-Immunoassay	Ainity I
w1 Ambrosie, beifußblättrige, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w10 Weisses Glänsekuss, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w11 Salzkraut, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w12 Goldrute, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w13 Spitzklette, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w14 Fuchschwanz/Amaranth, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w15 Melde, IgE	1446.10	32.4	Trenngel Serum	Serum						

w204 Sonnenblume, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w206 Kamille, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w207 Lupine, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w21 Glaskraut, latiges (Parietaria judaica), IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w211 Par 12, Glaskraut (P. judaica), IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w22 Hopfen, japanisch, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w23 Krauser Ampfer, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w230 nLmb a 1, Ambrosie (A. artemisiifolia), IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w231 nLrt v 1, Beifuss, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w232 nSal k 1, Salzkraut, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w233 nLrt v 3, Beifuss, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w234 Plia 11, Spitzwegerich, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w3 Ambrosie, dreilappig, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w4 Ambrosie, falsch, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w45 Luzerne, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w46 Wasserdost, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w5 Wermut, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w6 Beifuss, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w7 Margerite, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w8 Löwenzahn, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w2 Amaranth/Palmer, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w9 Spitzwegerich, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr		Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w1 Kräutermischung 1, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: w1 Ambrosie beifussblättrige, w6 Beifuss, w9 Spitzwegerich, w10 Weisser Gänsefuss, w11 Salzkraut.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w2 Kräutermischung 2, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: w2 Ragweed ausdauernde Ambrosie, w6 Beifuss, w9 Spitzwegerich, w10 Weisser Gänsefuss, w15 Heide.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w209 Kräutermischung Ambrosien, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: w1 Beifussblättrige Ambrosie, w2 Ausdauernde Ambrosie, w3 Dreilappige Ambrosie.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w3 Kräutermischung 3, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: w6 Beifuss, w9 Spitzwegerich, w10 Weisser Gänsefuss, w12 Goldrute, w20 Brennnessel.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w5 Kräutermischung 5, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: w1 Ambrosie beifussblättrige, w6 Beifuss, w7 Margerite, w8 Löwenzahn, w12 Goldrute.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w6 Kräutermischung 6, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: w9 Spitzwegerich, w10 Weisser Gänsefuss, w11 Salzkraut, w18 Sauerampfer.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250
w7 Kräutermischung 7, IgE	1446.10	32.4	Trennigel Serum	Serum	2 Tage	7 Tage	1 Jahr	Mischung enthält folgende Allergene: w7 Margerite, w8 Löwenzahn, w9 Spitzwegerich, w10 Weisser Gänsefuss, w12 Goldrute.	Immunoassay (FEIA)	Phadia 250