

## DES-CONTROLLER®

## D7-02-ES-MA

Transportkontrolle

### Zweck

Der DES-CONTROLLER® **D7-02-ES-MA** dient der Überwachung von Transportbedingungen (z. B. Temperatur- und Umwelteinflüsse) während des Versands.

### Sicherheit

Der Testkeim des DES-CONTROLLER® ist in einer mechanisch, chemisch und thermisch stabilen Membran eingeschlossen. Bei sachgemäßem Umgang ist keine Kontamination der Umgebung möglich.

### Anwendung

Der DES-CONTROLLER® zur Transportkontrolle ist ausschließlich zur Mitführung während des Transports vorgesehen. Eine Öffnung, Anwendung oder Einbringung in einen Prozess ist streng untersagt. Der DES-CONTROLLER® ist ungeöffnet und unbenutzt zusammen mit den eingesetzten DES-CONTROLLern an das Labor zurückzusenden.

Je Bestellung, Lieferung und Standort ist genau eine Transportkontrolle vorgesehen.

### Dokumentation

Der Begleitformular ist für die Zertifikatserstellung zwingend erforderlich, sollte Dieser Ihnen nicht per Mail zugesendet worden sein, laden Sie das zugehörige Begleitformular bitte über folgenden Link herunter und füllen Sie dieses vollständig aus (z. B. Maschinenkennung, Programm, Datum).

Die Transportkontrolle kann auf dem Begleitformular der anderen eingesetzten DES-CONTROLLER® durch Angabe der entsprechenden ID-Nummer mit dokumentiert werden. Eine separate Dokumentation der Transportkontrolle ist nicht erforderlich.

Formular-Download: <https://www.descontroller.com>

### Rücksendung zur Auswertung

**PUS Service GmbH**  
**c/o DES-CONTROLLER AG**  
**Am Müggelpark 23**  
**15537 Gosen-Neu Zittau**  
**Deutschland**

### Auswertung & Ergebnis

Bestanden: Kein Keimwachstum nachweisbar – Desinfektionsprozess wirksam.

Nicht bestanden: Keimwachstum nachweisbar – Prozess nicht ausreichend wirksam. Der DES-CONTROLLER® dient der Prozessüberwachung und ersetzt keine Maschinenwartung, Schulung des Personals oder Hygienekonzepte.

