


4Action

SPORT-MUNDSCHUTZ
WIR SCHÜTZEN IHR LÄCHELN!

Abdrucknahme:

Die Qualität der Abformung ist für die Anfertigung eines 4Action Sport-Mundschutzes außerordentlich wichtig. Sie ist für die Passform, den Tragekomfort und die Sicherheitseigenschaften verantwortlich. Um diese Anforderungen zu gewährleisten, ist die detaillierte Wiedergabe von Zähnen, Zahnfleisch, der Umschlagfalte und des Lippenbändchens unbedingt notwendig.

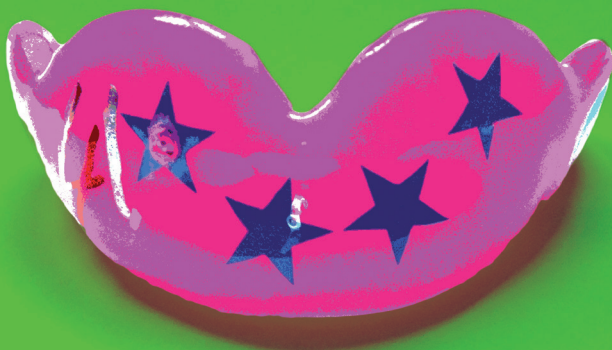

Risiken bei der Abdrucknahme:

Lockere Milchzähne, Füllungen, Kronen, Brücken, Zahnersatz, sowie Retainer können ggf. im Abdruck verbleiben. Abdrücke bei festsitzenden Klammern lassen Sie daher bitte bei Ihrem Zahnarzt oder Kieferorthopäden fertigen.

In einigen wenigen Fällen kann es außerdem zu Zahnfleischbluten oder auch starkem Würgereiz mit möglichem Erbrechen kommen. Eventuelles Verschlucken vom Abdruckmaterial (Silikonbasis) ist hingegen problemlos.

Mit Ihrer Unterschrift stimmen Sie der Abdrucknahme ausdrücklich zu. Bei Problemen mit Ihrem 4Action Sport-Mundschutz, melden Sie sich bitte telefonisch um einen Termin zu vereinbaren.

Ihr Ansprechpartner: Mathias „Matten“ Leisner, Tel. 040 590796

4Action

SPORT-MUNDSCHUTZ
WIR SCHÜTZEN IHR LÄCHELN!

Abholtermin:

Ihr 4Action Sport-Mundschutz kann ab dem _____
hier abgeholt werden: _____

Ihr Wunschlogo schicken Sie bitte schnell an: logo@4action.de

Pflege Ihres 4Action Sport-Mundschutzes:

1. Nach der Benutzung, den 4Action Sport-Mundschutz mit Wasser abspülen. Reinigungsmittel - nur unten aufgeführte.
2. Vermeiden Sie zu heißes Wasser oder starkes Sonnenlicht, es würde den 4Action Sport-Mundschutz verformen.
3. Ihr 4Action Sport-Mundschutz wurde individuell und nur für Sie angefertigt. Niemand anderes darf ihn in den Mund einsetzen, es könnte zu Beschädigungen kommen.



täglicher Verwendung. Enthält keine Schleifstoffe, somit erhebliche Verlängerung der Lebensdauer von Schienen.

4Action Fresh

Die antibakterielle Sprühlösung wirkt plaque-inhibierend und verzögert für 24 Stunden die Ablagerung oralspezifischer Mikroorganismen auf Ihrem 4Action Sport-Mundschutz. Spezielle Inhaltsstoffe vermindern Bakterienwachstum. Die natürliche Mundflora bleibt dabei jedoch intakt.

4Action Fresh ist auf einer A-Silikonbasis und enthält Chlorhexidin und ätherische Öle.

Dreve Maxifresh

Die Dreve Maxifresh Reinigungstablette ist geeignet zur äußeren Pflege und Reinigung von dentalen Schienen. Gewährleistet einwandfreie Hygiene und Verringerung von Verfärbungen bei

